

Használati útmutató

Cikkszám: BTX-04300034

Megnevezés: Szájmaszk, 3 rétegű, higiéniai


EAN: 2004300034015

1. lépés



Mosson kezet a maszk felhelyezése előtt!

2. lépés

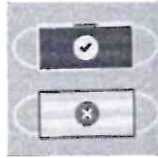

Bizonyosodjon meg róla, hogy a színezett rész nem az arc felőli részen található!

3. lépés



Akassza a fülére a pántot!

4. lépés



Állítsa be az orrmerevítőt úgy, hogy megfelelően illeszkedjen az orrnyereghez!

5. lépés



Igazítsa úgy a maszkot, teljesen elfedje az állát!

6. lépés




Ne érintse meg a maszkot a viselés ideje alatt!

7. lépés



A pánt segítségével távolítsa el a maszkot az arcától!

8. lépés

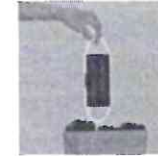

A pántot fogva dobja ki a maszkot! Ne érintse meg az arcot eltakaró részt!

 **MAGIC TOOLS®** 4
MAGIC TOOLS KFT.
1107 Budapest, Száva u. 9.
Adószám: 22751010-2-43
06-1-347-0242

FORDÍTOTTA: Magic Tools Kft.
Cím: 1107 Budapest, Száva utca 9.